

# Návod k použití

## Sterilní krytí na popáleniny a rány BurnFree

0505, 0515, 1010, 1040, 2020, 2045, 3030, 3040

### POPIS VÝROBKU

Sterilní krytí BurnFree je určené pro první pomoc při všech typech popálenin.

- Pomáhá zmírnit bolest,
- Chrání ránu před kontaminací
- chladí a uklidňuje pokožku,
- je rozpustné ve vodě a nepřilnavé

### NÁVOD

Otevřete balení BurnFree, vyjměte krytí s naneseným chladivým gelem a ihned jej přiložte na postižené místo. Abyste krytí udrželi na správném místě, obvažte je jemně obvazem.

### VAROVÁNÍ

Nebezpečí kontaminace při opakovaném použití produktu. Pouze k zevnímu použití. V případě vážného popálení okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc u vyškoleného poskytovatele nebo lékaře. Dojde-li k podráždění, při použití produktu, nebo k vyrážce, přestaňte jej používat a poraďte se s lékařem .

Uchovávání: Při teplotě 10°C - 40°C

**Výrobce:** Water-Jel Technologies, L.L.C.  
50 Broad Street. Carlstadt, NJ 07072, USA

**EC REP** Safeguard International, Ltd.,  
Willow Grove, Delgany, Co Wicklow,  
A63 XY89, Ireland

### Distributor ČR:

BEXAMED s.r.o.  
Miranova 148/10  
102 00 Praha 10 – Hostivař  
[www.bexamed.cz](http://www.bexamed.cz)

Poslední revize textu: duben 2021



STERILE R

