

NÁVOD K POUŽITÍ - SÁDROVÝ OBVAZ

orthoBAND FAST Sádrový obvaz, doba tuhnutí 3 min.

REF: OBWL-F

orthoBAND NORMAL Sádrový obvaz, doba tuhnutí 5-6 min.

REF: OBWL-N

orthoBAND LONG Sádrový obvaz, doba tuhnutí 8-12 min.

REF: OBWL-L

W - šířka sádrového obvazu, **L** - délka sádrového obvazu

Indikace k použití

- Zdravotnický prostředek, který je určen k fixaci/znehybnění v podobě úplného nebo neúplného ošetření při ortopedických, ambulantních nebo chirurgických zákrocích.

Maximální doba používání

- Doba používání u jednoho pacienta by neměla přesáhnout 4 týdny.

Příprava před použitím

- Před použitím je nutné nanést podkladovou vatou pod sádrový obvaz.
- Připravte sádrový obvaz v souladu s postupem namáčení uvedeným v návodu k použití v bodech 6 a 7.

Návod k použití

1. Vyberte typ obvazu v závislosti na počáteční době tuhnutí a šířku obvazu podle velikosti a místa aplikace.
2. Řádně očistěte místo aplikace obvazu. Odřeniny pokožky a poúrazové rány by měly být zakryté sterilním krytím.
3. V místě aplikace sádrového obvazu je nutné nanést podkladovou vatou pod sádrový obvaz.
4. Připravte si dostatečné množství ob vazů pro oblast, kterou chcete zpenit.
5. Otevřete obal a vyjměte obvaz, zkontrolujte, zda není poškozen.
6. Ponořte obvaz pod úhlem 45° do nádoby s vodou s teplotou 20 °C. Doba namáčení obvazu ve vodě je přibližně 5 sekund, dokud se neuvolní velké vzduchové bubliny.
7. Vyjměte obvaz z vody. Vymačkejte přebytečnou vodu z obvazu.
8. Krouživými pohyby rovnoměrně a bez natahování nanášejte sádrový obvaz směrem od sebe tak, aby se následné vrstvy překrývaly v 1/3 šířky. Počáteční doba tuhnutí sádrového obvazu závisí na zvoleném typu (viz. tabulka).
9. Vymodelujte obvaz.

Poznámky k výrobku a varování

- Jednorázové použití
- Zároveň se sádrovým obvazem je snímaná podkladová vata.
- Nesterilní výrobek, nepoužívejte přímo na rány a k převazování ran.
- Nepoužívejte výrobek pokud je poškozený nebo znečištěný.
- Nepoužívejte výrobek po uplynutí data bezpečného použití uvedeného na obalu.
- Nižší teplota vody prodlouží dobu modelování a tuhnutí, vyšší teplota tuto dobu zkrátí, při teplotě nad 24 °C může dojít k vyšší teplotě obvazu, čímž může dojít k termickému poškození kůže.
- Neprodlužujte dobu namáčení obvazu.
- Pokaždé ponořte pouze jeden obvaz. Nenechávejte ve vodě několik ob vazů.
- Při aplikaci sádrového obvazu se doporučuje používat ochranné rukavice.

Zvláštní podmínky skladování nebo manipulace

- Doba použitelnosti výrobku je 5 let od data výroby.
- Skladujte v souladu s podmínkami uvedenými na obalu výrobku, při teplotě 5 °C - 40 °C, vlhkost 30-75 %.

Likvidace

Použité prostředky mohou představovat potenciální biologické nebezpečí. Měly by být zlikvidovány v souladu s předpisy pro zdravotnický odpad.

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti se zdravotnickým prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu.

Typ	Doba namáčení	Doba tuhnutí	Doba úplného ztuhnutí
orthoBAND FAST	5 s.	≤3 min.	24 h
orthoBAND NORMAL	5 s.	5-6 min.	24 h
orthoBAND LONG	5 s.	8-12 min.	24 h

Rev. 01 26.05.2021r.



Vysvětlení symbolů použitých na obalu:

SYMBOL	NÁZEV SYMBOLU
	Katalogové číslo
	Označení shody CE
	Zdravotnický prostředek
	Nesterilní
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozený
	Nepoužívejte opakovaně
	Viz. návod k použití
	Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla

	chraňte před vlhkostí
	Teplotní limit
	Omezení vlhkosti
	Polyethylen s nízkou hustotou
	Výrobce
	Balící jednotka
	Doba použitelnosti
	Číslo šarže
	Značka shody s požadavky ukrajinského trhu