



Návod k použití

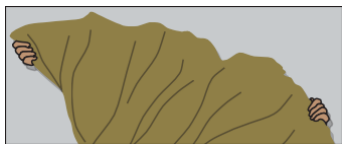

1. Otevřete obal a vyjměte přikrývku. Rozbalte přikrývku a opatrně ji roztáhněte do stran.

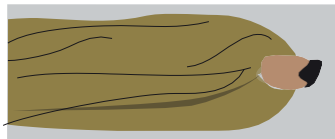

2. Umístěte přikrývku kolem ramen zraněné osoby kovovou stranou směrem k ní. Změňte polohu a v případě potřeby zopakujte krok 1.

Obsah:

1x přikrývka Blizzard IFAK

Zamýšlené použití:

Pro prevenci a léčbu hypotermie.

Profil uživatele:

Výrobky společnosti Blizzard jsou indikovány pro použití zdravotníky a laiky.

Profil pacienta:

Výrobky společnosti Blizzard jsou indikovány pro použití u pacientů ohrožených hypotermií nebo vyžadujících léčbu hypotermie.

Klinické přínosy:

K omezení tepelných ztrát pacienta do okolního prostředí, což přispívá k prevenci další újmy na zdraví.

Charakteristiky účinnosti:

Zajistit větruvzdornou a vodovzdornou bariéru vůči prostředí a zároveň poskytnout vyšší tepelnou izolaci.

Prohlášení o výrobku:

Hodnota tepelné izolace přibližně 5 tog.

Kontraindikace:

Nenechávejte pacienta bez dozoru. Vyhledejte přístřešek, nepoužívejte v nebezpečném prostředí, například na skalních převiscích nebo v blízkosti stromů za bouřky. Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti. Při použití po uplynutí doby použitelnosti může dojít ke ztrátě funkčnosti.

Zbytková rizika / varování:

Nebezpečí zadušení, nezakrývejte obličej. Zajistěte monitorování pacienta v pravidelných intervalech. Dojde-li k hypotermii, vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

Podávání zpráv:

Jakékoli závažné události prosím oznamte výrobci (infouk@ps-med.com).



Výrobce a distributor:

Blizzard Protection Systems Limited Unit 2

Coed y Parc Industrial Estate Bethesda,
Bangor, Gwynedd, LL57 4YY, Spojené
království +44 (0)1248 600666 | infouk@ps-med.com |

www.blizzardsurvival.com

Hmotnost. 125g (4.5oz)



Zplnomocněný zástupce v EU, dovozce:

Comply Express Lda, StartUp Madeira, EV
141 Campus da Penteada, 9020 105 Funchal,
Portugalsko

Distributor ČR:

BEXAMED s.r.o.

Miranova 148/10


102 00 Praha 10 - Hostivař

www.bexamed.cz


Poslední revize textu: únor 2022



Návod k použití

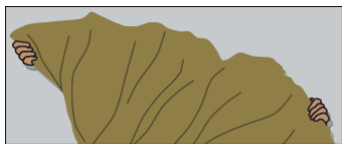

2. Otevřete obal a vyjměte přikrývku. Rozbalte přikrývku a opatrně ji roztáhněte do stran.

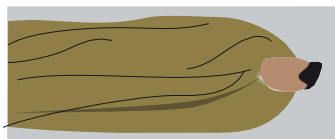

2. Umístěte přikrývku kolem ramen zraněné osoby kovovou stranou směrem k ní. Změňte polohu a v případě potřeby zopakujte krok 1.

Obsah:

1x přikrývka Blizzard IFAK

Zamýšlené použití:

Pro prevenci a léčbu hypotermie.

Profil uživatele:

Výrobky společnosti Blizzard jsou indikovány pro použití zdravotníky a laiky.

Profil pacienta:

Výrobky společnosti Blizzard jsou indikovány pro použití u pacientů ohrožených hypotermií nebo vyžadujících léčbu hypotermie.

Klinické přínosy:

K omezení tepelných ztrát pacienta do okolního prostředí, což přispívá k prevenci další újmy na zdraví.

Charakteristiky účinnosti:

Zajistit větruvzdornou a vodovzdornou bariéru vůči prostředí a zároveň poskytnout vyšší tepelnou izolaci.

Prohlášení o výrobku:

Hodnota tepelné izolace přibližně 5 tog.

Kontraindikace:

Nenechávejte pacienta bez dozoru. Vyhledejte přístřešek, nepoužívejte v nebezpečném prostředí, například na skalních převisích nebo v blízkosti stromů za bouřky. Nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti. Při použití po uplynutí doby použitelnosti může dojít ke ztrátě funkčnosti.

Zbytková rizika / varování:

Nebezpečí zadušení, nezakrývejte obličej. Zajistěte monitorování pacienta v pravidelných intervalech. Dojde-li k hypotermii, vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

Podávání zpráv:

Jakékoli závažné události prosím oznamte výrobci (infouk@ps-med.com).



Výrobce a distributor:

Blizzard Protection Systems Limited Unit 2

Coed y Parc Industrial Estate Bethesda,
Bangor, Gwynedd, LL57 4YY, Spojené
království +44 (0)1248 600666 | infouk@ps-med.com |

www.blizzardsurvival.com

Hmotnost. 125g (4.5oz)



Zplnomocněný zástupce v EU, dovozce:

Comply Express Lda, StartUp Madeira, EV
141 Campus da Penteada, 9020 105 Funchal,
Portugalsko

Distributor ČR:

BEXAMED s.r.o.

Miranova 148/10

102 00 Praha 10 - Hostivař

www.bexamed.cz

Poslední revize textu: únor 2022

