

HEMCON®

CHITOGAUZE® XR PRO



Manufactured for:

Tricol Biomedical, Inc.

720 SW Washington Street, Suite 200

Portland, OR 97205 U.S.A.


www.tricolbiomedical.com | info@tricolbiomedical.com

+1.503.245.0459 | Toll Free (U.S. & Canada) 877.247.0196

CEpartner4U, Esdoornlaan 13,

3951DB Maarn, The Netherlands

www.cepartner4u.eu

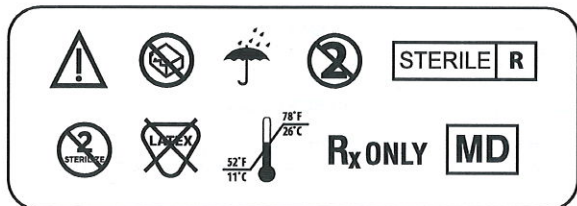

Distributed by:

SAFEGUARD
MEDICAL™

Prometheus Medical Technologies

The Old Rectory, Hope Under Dinmore,

Herefordshire, HR6 0PW, UK

www.prometheusmed.com

RM7172 Rev. 10 06/2022

CZECH – ČEŠTINA

HEMCON® CHITOGAUZE® XR PRO | DETEKOVATELNÝ POMOCÍ RTG

Účel použití / indikace:

HemCon ChitoGauzeXR PRO je hemostatický obvaz pro vnější dočasné ošetření silně krvácejících ran.

Návod k použití pro obvaz ChitoGauzeXR PRO:

1. Otevřete fóliový obal a vyjměte obvaz ChitoGauzeXR PRO.
2. Identifikujte a překryjte zdroj krvácení obvazem, na zdroj krvácení přitlačte pomocí svých prstů.
3. Celou ránu kryjte obvazem. K vyplnění rány použijte dostatek obvazu ChitoGauzeXR PRO a překryjte všechny krvácející povrchy. Může být potřebný další obvaz.
4. Pokud stříháte obvaz na menší velikost, zajistěte, aby byl rentgenkontrastní prvek obsažen v částech, které použijete.
5. Na ránu přitlačte, dokud nebude krvácení zastaveno.
6. Zajistěte obvaz na ráně tak, aby se udržel tlak obvazu.

K POUŽITÍ PROŠKOLENÝMI ZÁCHRANÁŘI

Upozornění / varování:

URČENO POUZE K VNĚJŠÍMU POUŽITÍ, NEIMPLANTUJTE.

Nepoužívejte, pokud je ohrožena těsnost nebo je obsah mokrá. Neaplikujte na oči. Nepoužívejte v blízkosti páteře. Použijte ihned po otevření. Obsahuje chitosan z měkkýšů. Pouze na jedno použití. Zlikvidujte veškerý nepoužitý zbytek produktu. Nesterilizujte opakovaně. Není vyrobeno z latexu přírodního kaučuku.

Vyhledejte lékařskou pomoc:

- Jestliže se krvácení nezastaví nebo se objeví zarudnutí nebo otok.
- Pokud máte podezření na alergickou reakci.