

AEROresc® – EASY Splint | Univerzální kolejnice

REF: HIMT02-SP-XL | HIMT02-SP-M | HIMT02-SP-XS | HIMT02-SP-XL-SET |
HIMT02-SP-M-SET | HIMT02-SP-SET1 | HIMT02-SPT-XL | HIMT02-SPT-M |
HIMT02-SPT-XS | HIMT02-SPT-XL-SET | HIMT02-SPT-M-SET | HIMT02-SPT-SET1

CS Čeština

1. Bezpečnostní pokyny



Pozor:

- 1.1 Tento návod k použití nenahrazuje pokyny/zaškolení uživatele.
- 1.2 Univerzální dlahy AEROresc® – EASY Splint je povoleno používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití.
- 1.3 Nepoužívejte u fraktur obratlů a pánve.
- 1.4 Nepoužívejte u otevřených ran. Otevřené rány je nutné před použitím dlahy překrýt sterilními obvazy.
- 1.5 Seřiznutí dlahy může vést k vzniku ostrých okrajů, které je nutné zakrýt nebo zahnout.
- 1.6 U delšího použití (>1 hodina) musí v místě kontaktu prostředku s pacientem být použity měkké vycpávky (textilie, obinadla, bandáže).
- 1.7 V případě fixace dlahy je nutné dávat pozor, aby nedošlo k přerušení toku krve. Prsty ruky nebo nohy musí být volně dostupné za účelem kontroly periferního prokrvení.

2. Účel použití

Univerzální dlahy AEROresc® – EASY Splint slouží ke stabilizaci a dlahování fraktur a sportovních poranění (např. natažení vazů). Kromě toho je lze používat jako infuzní dlahy.

3. Popis výrobku

- 3.1 Univerzální dlahy AEROresc® – EASY Splint jsou vyrobeny z lehkého materiálu propustného pro rentgenové záření. Plášť je vyroben z plastu (IXPE) – Strana v kontaktu s pacientem je modrá nebo šedá. | Vnější strana je žlutá nebo olivově zelená. Jádru je vyrobeno ze slitiny hliníku.
- 3.2 Ohebný materiál lze v případě potřeby:
 - odstříhnout na požadovanou velikost nůžkami (bez zoubkování),
 - předtvarovat s cílem optimálně stabilizovat postižené části těla,
 - za účelem zvýšení stability zahnout, ohnout podle požadavků nebo kombinovat s jinými dlahami.

4. Obsluha / manipulace

- 4.1 Vytvarujte dlahu, aby dokonale odpovídala tvarem příslušné části těla.
- 4.2 Přiložte dlahu na postiženou část těla a zafixujte ji elastickým obvazem nebo obinadlem. Při dlouhodobém používání se doporučuje v místě kontaktu s pacientem použít polstrování.
- 4.3 Při fixaci dlahy je nutné zajistit volný přístup k prstům ruky nebo nohy za účelem kontroly prokrvení.
- 4.4 Základní tvary:



C-křivka

- ① C-křivku vytvarujete zatáhnutím obou bočních okrajů dovnitř.

Obrácená C-křivka

- ② Vytvarujte C-křivku. Poté natvarujte boční okraje v opačném směru.

T-křivka

- ③ Složte boční okraje k sobě. Poté ohněte polovinu každé strany do úhlu 90°.

- 4.5 Příklady použití: viz část „7. Příklady použití“.

Upozornění: Všechny závažné nežádoucí události vzniklé ve spojitosti s produktem je nutné nahlásit výrobci a příslušnému zodpovědnému úřadu.

5. Čištění a dezinfekce

- 5.1 Univerzální dlahy AEROresc® – EASY Splint je nutné po každém použití vyčistit a dezinfikovat v souladu s místně platnými hygienickými směrnici.
- 5.2 Dlahy lze čistit jemným čisticím prostředkem nebo povrchovou dezinfekcí. Dodržujte pokyny výrobce.
- 5.3 Opláchněte čistou vodou, abyste odstranili čisticí a/nebo dezinfekční prostředek.
- 5.4 Nechte dlahy úplně vyschnout.

6. Technické údaje

Rozměry a hmotnost

Velikost XL:	100 x 11 cm přibl. 160 g
Velikost M:	50 x 11 cm přibl. 80 g
Velikost XS:	5 x 11 cm přibl. 4 g


Skladovací teplota: - 25 až 65 °C

Materiál

Povrchová úprava:	polyethylenová pěna (IXPE)
Jádno:	hliník

7. Příklady použití

Límcová dlahu

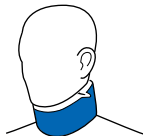


Dvojitá dlahu na zápěstí




Dlahu na prst




Kleštinová dlahu na předloktí

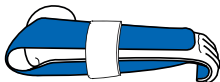


Kleštinová dlahu na nadloktí

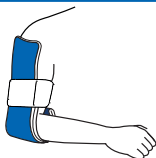


Dlahu na kotník

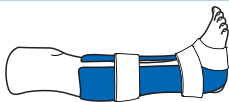

Dlahu na koleno/nohu

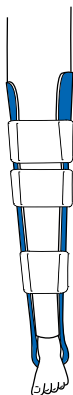

Možnost také dalších použití!

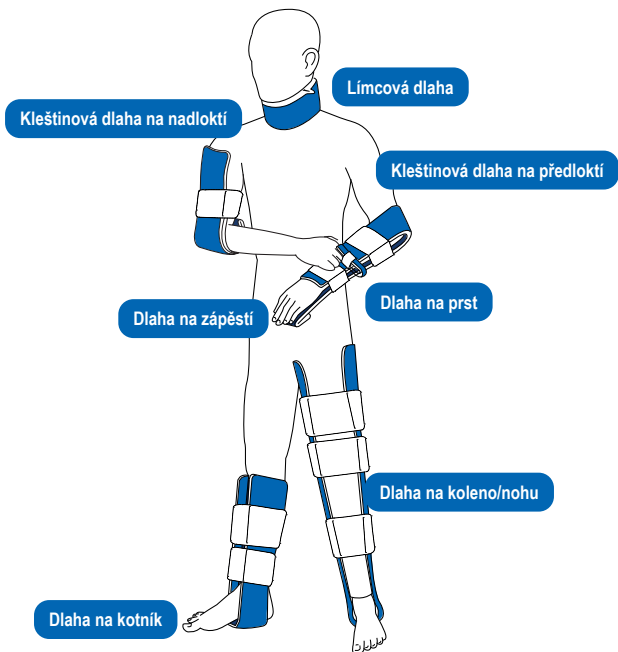

8. Vysvětlení symbolů



Zdravotnický prostředek

HUM
Systems for Life®



Evropský dovozce:
HUM Gesellschaft für Homecare und
Medizintechnik mbH
Zum Pier 79 | 44536 Lünen | Germany
ID 6205057 Rev. 1.0 | 29.06.2023



MedNet EC-REP GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany



Anping Guardian Medical
Equipment Co., Ltd
500 meters, Nan Sucun, Anping
County, Hengshui City, Hebei Province,
053600, P.R.China

